

Instrukcja używania maseczki 3-warstwowej

1. Otwórz opakowanie, wyjmij i rozciągnij maseczkę, unikając dotykania jej wewnętrznej strony
2. Trzymając za gumki na obu końcach maseczki, umieść ją na twarzy zakrywając nos, usta i podbródek. Upewnij się, że elastyczny pasek wszyty w maseczkę znajduje się na nosie
3. Dognij pasek tak, aby dobrze przylegał do grzbietu nosa
4. Upewnij się, że maska dobrze przylega do twarzy i podbródka, a jej dolna krawędź znajduje się pod brodą

Producent: XIANTAO CHENGUANG PROTECTION COMMODITY CO, LTD
Gongqing Industry Garden, Yewang Road, Xiantao City, China

Autoryzowany Przedstawiciel: SUNGO Europe B.V., Olympish Stadion 24,
107DE Amsterdam, Netherlands